


# 日本光電製AEDトレーナー



・ AED本体、リモコンがセットになっています。

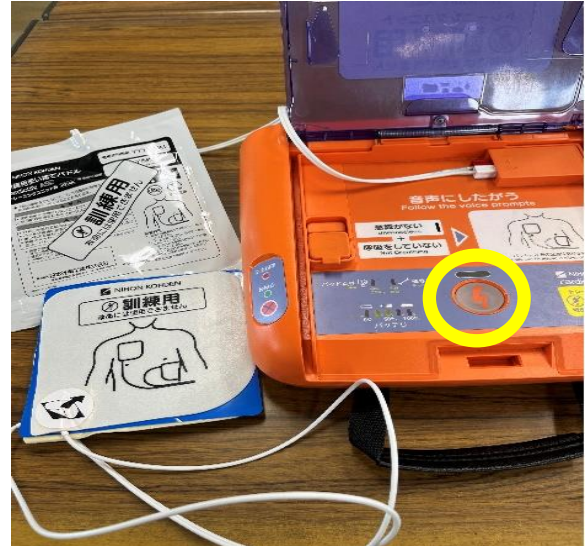

・ 蓋の中にパッドが入っています。  
・ 黄丸がショックボタンです。



・ 使用するのは、黄丸の2番のボタンです。



・ 黄丸の部分が受光部です。

## 使用手順

①蓋を開けると自動的に電源が入ります。

「意識、呼吸を確認してください」

「胸を裸にしてAEDの蓋から四角い袋を取り出してください」

「袋を破いてパッドを取り出してください」

「パッドの一つをシートからはがして図のように右胸に貼ってください」

②リモコンの2番のボタンを押すと次に進みます。

「身体に触らないでください、心電図を調べています」

③リモコンの2番のボタンを押すと次に進みます。

「電気ショックが必要です、充電しています」

「身体から離れてください、点滅ボタンをしっかりと押して下さい」

④AED本体の点滅しているボタンを押す。

「電気ショックを行いました、身体に触っても大丈夫です」

「直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください」