

レールダルAEDトレーナー

- ・ AED使用方法を学べる資器材です。



- ・ 本体開封時
- ・ AED本体、トレーニング用パッド、タオルが同封されています。



- ・ 使用方法
- ①開封する
- ②電源を入れる（緑色ボタン）
- ③アナウンスに従って、パッドを所定の位置に貼る。
- ④パッドのコネクターを本体に差し込む。
- ⑤点滅したショックボタンを押す（オレンジ色）

※このAEDトレーナーは、リモコンでの操作は必要ありません。